

BALCONY

SDS1.1 und SDS2.0

- Sofortimplantation Seitenzahnbereich, bei asymmetrischer Implantatposition, Balkon verbessert Emergenzprofil

SDS2.0-ba	4.6 5.4	4.6 5.4	3.8 4.6	3.8 4.6							3.8 4.6	3.8 4.6	4.6 5.4	4.6 5.4	SDS2.0-ba
SDS1.1-ba	4.6	4.6	3.8 4.6	3.8 4.6							3.8 4.6	3.8 4.6	4.6	4.6	SDS1.1-ba
regio	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	regio
regio	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	regio
SDS1.1-ba	4.6	4.6	3.8 4.6	3.8 4.6							3.8 4.6	3.8 4.6	4.6	4.6	SDS1.1-ba
SDS2.0-ba	4.6 5.4	4.6 5.4	3.8 4.6	3.8 4.6							3.8 4.6	3.8 4.6	4.6 5.4	4.6 5.4	SDS2.0-ba

OVAL

SDS1.1 und SDS2.0 mit Durchmesser 4.6

- Prämolarenbereich, wenn Lücke schmal
- SDS1.1_4.6-ov_6x8: Alternativ bei ausreichend großer Lücke, anstatt dem SDS1.1_4.6-ov einsetzbar

SDS1.1 und SDS2.0 mit Durchmesser 5.4

- Molaren OK/UK zentrale Position, meist Spätimplantation, aber auch Sofortimplantation bei gutem interradiikulärem Septum

SDS2.0-ov	5.4	5.4	4.6	4.6							4.6	4.6	5.4	5.4	SDS2.0-ov
SDS1.1-ov	5.4	5.4	4.6	4.6							4.6	4.6	5.4	5.4	SDS1.1-ov
regio	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	regio
regio	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	regio
SDS1.1-ov	5.4	5.4	4.6	4.6							4.6	4.6	5.4	5.4	SDS1.1-ov
SDS2.0-ov	5.4	5.4	4.6	4.6							4.6	4.6	5.4	5.4	SDS2.0-ov

SINUS

SDS2.0_3.8-si

- Externer Sinus ausschließlich im Prämolaren Bereich (ohne Knochenersatzmaterial), mindestens 3 mm bis maximal 5 mm Restknochen

SDS2.0_4.6-si

- Externer Sinus im Molaren Bereich (ohne Knochenersatzmaterial), mindestens 3 mm bis maximal 5 mm Restknochen

SHORT

SDS2.0_4.6-sh

- Mindestens 6 mm Restknochen, Abstand zu den Antagonisten/Kronenhöhe beachten, Spät-/Sofortimplantation Prämolaren Bereich, keine Sofortversorgung

SDS2.0_5.4-sh

- Mindestens 6 mm Restknochen, Abstand zu den Antagonisten/Kronenhöhe beachten, Spät-/Sofortimplantation Prämolaren-/Molaren Bereich, keine Sofortversorgung